

# MANUALE PER L'UTENTE

## *Filtro a sifone Vac Trap*

**Filtro a sifone di protezione del vuoto**



**Modello: PM9000** (in figura)

**CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI**

**ATTENZIONE**

La legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita di questo dispositivo solo a medici o su prescrizione medica.

**PRECISION**  **MEDICAL**

300 Held Drive  
Northampton, PA 18067 USA

Tel.: +1 610-262-6090  
Fax: +1 610-262-6080

[www.precisionmedical.com](http://www.precisionmedical.com)

## **RICEVIMENTO/ISPEZIONE**

Rimuovere il filtro a sifone Precision Medical, Inc. dalla confezione e verificare che non presenti danni. Qualora si rilevino danni, **NON UTILIZZARE** e contattare il fornitore.

## **USO PREVISTO**

Consente di proteggere regolatori di aspirazione e sistemi di vuoto centrali dalla contaminazione da liquidi.

## **PRIMA DELL'USO LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI**

Il presente manuale fornisce istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del filtro a sifone da parte di un professionista, al fine di garantire la sicurezza e prevenire danni al filtro. Qualora il manuale non risulti chiaro, **NON UTILIZZARE** il filtro a sifone e rivolgersi al fornitore.

## INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA - AVVERTENZE E PRECAUZIONI

### **⚠AVVERTENZA**

Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può causare lesioni gravi o mortali.

### **⚠ATTENZIONE**

Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può causare lesioni lievi o moderate.

### **ATTENZIONE**

Se utilizzato senza il simbolo di pericolo, indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, potrebbe causare danni a oggetti.

### **⚠AVVERTENZA**

Utilizzare il filtro a sifone esclusivamente per l'uso previsto, descritto nel presente manuale.


### **⚠ATTENZIONE**

- Il filtro a sifone può essere usato esclusivamente da personale addestrato al suo utilizzo.
- Verificare che tutti i collegamenti siano saldi e non presentino perdite.

# SCHEMA DI INSTALLAZIONE TIPICA

## ⚠ATTENZIONE

Per funzionare correttamente il filtro a sifone deve essere in posizione verticale.

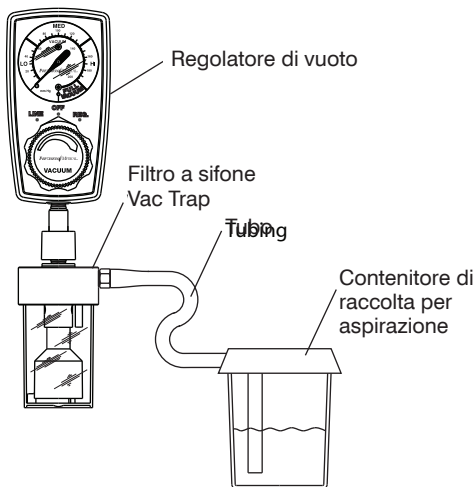

## ELENCO DEI PEZZI

Descrizione	N. pezzo
Gruppo del galleggiante	503234
Vaso di raccolta	1731
Nipplo per tubo	9073

## MANUTENZIONE

Prima di ciascun utilizzo verificare che il filtro a sifone non presenti danni. **NON USARE** se sono presenti danni.

## RESTITUZIONE

Per la restituzione di un prodotto è necessario ottenere un codice di autorizzazione (RGA), rivolgersi a Precision Medical, Inc. Tutti i prodotti restituiti devono essere confezionati in contenitori sigillati per evitare danni. Precision Medical, Inc. non si assumerà alcuna responsabilità per prodotti danneggiati durante il trasporto. Fare riferimento alla procedura di restituzione di Precision Medical, Inc. disponibile sul sito Web [www.precisionmedical.com](http://www.precisionmedical.com)

***I manuali sono disponibili sul sito Web  
[www.precisionmedical.com](http://www.precisionmedical.com)***

## ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Smaltire il filtro a sifone in conformità con le norme locali.

**Riciclare**



### **⚠️ AVVERTENZA**

Per lo smaltimento del filtro a sifone rispettare le precauzioni contro il rischio biologico.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Probabile causa	Soluzione
Galleggiante bloccato	1. Collo del galleggiante sporco	1. Rimuovere i corpi estranei
Nessuna aspirazione	1. Perdita dai colleganti 2. Fonte di aspirazione non attiva 3. Vaso di raccolta pieno	1a. Controllare i collegamenti e ricollegare 1b. Serrare il vaso di raccolta 2. Accendere la fonte di aspirazione 3. Vuotare/pulire il vaso di raccolta

## PULIZIA

1. Svitare il vaso di raccolta.
2. Rimuovere il gruppo del galleggiante.

### **Sterilizzazione a gas:**

È possibile utilizzare miscele di ossido di etilene a temperature fino a 135° F. Seguire le procedure indicate dal produttore dello sterilizzatore.

### **⚠ATTENZIONE**

- Superando le temperature di sterilizzazione consigliate la durata del filtro a sifone può essere inferiore.
- **NON** sterilizzare in autoclave.

# **GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Precision Medical, Inc. garantisce che il filtro di protezione per applicazioni mediche sarà privo di difetti di manodopera e/o dei materiali per il seguente periodo:

Un (1) anno dalla data della spedizione

Qualora nel periodo applicabile si manifesti una qualsiasi mancanza di conformità alla presente garanzia, Precision Medical, Inc. si impegna, previa notifica scritta e dopo avere accertato che i beni siano stati conservati, installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati in conformità con le istruzioni di Precision Medical, Inc. e con le procedure standard del settore, nonché dopo avere accertato che non siano state apportate modifiche, sostituzioni o alterazioni ai beni, a correggere il difetto mediante idonea riparazione o sostituzione a proprie spese.

**EVENTUALI DICHIARAZIONI A VOCE NON PONGONO IN ESSERE ALCUNA GARANZIA.**

Nessun rappresentante di Precision Medical, Inc. né alcun rivenditore è autorizzato a offrire garanzie a voce sulle merci descritte nel contratto e tali dichiarazioni non potranno essere ritenute valide, né sono parte del contratto di vendita. Pertanto, la presente scrittura è una dichiarazione definitiva, completa ed esclusiva dei termini del contratto.

**LA PRESENTE GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE O ALTRA GARANZIA DI QUALITÀ, TANTO ESPLICITA QUANTO ESPLICITA.**

In nessuna circostanza Precision Medical, Inc. si assumerà la responsabilità per danni speciali, accidentali o indiretti inclusi, in modo non limitativo, perdite di profitto, mancata vendita o lesioni alle persone e danni ai beni. La correzione di eventuali mancanze di conformità come indicate sopra costituisce l'unico adempimento in caso di responsabilità di Precision Medical, Inc., siano esse basate su contratto, negligenza, illecito o altro. Precision Medical, Inc. si riserva il diritto di interrompere la produzione di qualsiasi prodotto o di modificare i materiali, la progettazione o le specifiche dei prodotti senza previa notifica.

Precision Medical, Inc. si riserva il diritto di correggere eventuali errori amministrativi o tipografici senza sanzioni.

# *PRECISION* *MEDICAL*®

Precision Medical, Inc.  
300 Held Drive  
Northampton, PA 18067 USA

Numero verde - tel.: 800-272-7285

Numero verde - fax: 800-353-1240

Tel.: +1 610-262-6090

Fax: +1 610-262-6080

[www.precisionmedical.com](http://www.precisionmedical.com)

**Certificazione ISO 13485**